



Handarbeit aus Deutschland

Wir von Livella stehen für Nachhaltigkeit und haben den höchsten Qualitätsanspruch an unser Produkt. Aus diesem Grund fertigen wir die Silberhütchen in unserer Manufaktur im Norden Deutschlands.



Sicherheit und Vertrauen

Unsere Livella Silberhütchen bestehen zu 100% aus 999 Feinsilber. Das Material besitzt den höchstmöglichen Reinheitsgrad und ist TÜV-SÜD geprüft. Den zertifizierten Rohstoff beziehen wir aus Deutschland. Wir verzichten gänzlich auf Trägermaterialien oder Legierungen. Aus diesem Grund sind unsere Silberhütchen frei von Nickel und anderen Fremdmetallen.



Der Umwelt zur Liebe

Der natürliche und hochwertige Rohstoff der Livella Silberhütchen trägt zu einer langen Lebensdauer bei. Unsere Verpackung besitzt das FSC Siegel und durch die Herstellung in Deutschland werden lange Transportwege und unnötige CO2 Ausstöße vermieden.




Livella

Livella

Livella GmbH
Lokstedter Steindamm 3 b | 22529 Hamburg
info@livella.de
www.livella.de

 livella_official  livella

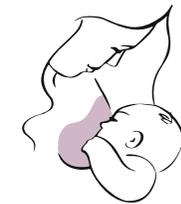

Silberhütchen

zur Anwendung bei Wunden Brustwarzen
während der Stillzeit

Die Hilfe bei schmerzenden und wunden Brustwarzen




Wusstest du, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dein Baby in den ersten 6 Lebensmonaten ausschließlich mit Muttermilch zu stillen und darüber hinaus in Kombination mit fester Nahrung bis zum zweiten Lebensjahr? Beides im Einvernehmen von Mutter und Kind.

Häufig kommt es aber schon in den ersten Tagen und Wochen zu erheblichen Stillbeschwerden. Viele Mamas brechen aufgrund starker Schmerzen hervorgerufen durch wunde Brustwarzen (Rhagaden) das Stillen ab und wechseln zur künstlichen Babymilch. Dadurch muss auf die vielen Vorteile eines natürlichen Stillens verzichtet werden.

Das muss nicht sein. Die Lösung hierfür sind die Livella Silberhütchen. Sie können dir dabei helfen die natürliche Wundheilung deiner Brustwarzen zu unterstützen. Einer liebevollen und angenehmen Stillzeit steht nichts mehr im Wege.

Unterstützt die natürliche Wundheilung

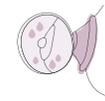

Wie funktionieren Livella Silberhütchen?

Äußerliche Einwirkung auf die beanspruchten Brustwarzen stören und hindern den natürlichen Wundheilungsprozess der geschädigten Haut.

Die anatomische Form der Livella Silberhütchen bedeckt und schützt die gereizten Brustwarzen ideal. Dadurch befindet sich immer etwas Muttermilch an den Brustwarzen, welche die feuchte Wundbehandlung unterstützt. In dieser Kombination aus Schutz und feuchtem Milieu können sich Hautzellen optimal erneuern und vermehren. So wird das Stillen in kürzester Zeit wieder angenehm.

Optimaler Schutz für empfindliche Brustwarzen



Wieso Livella Silberhütchen verwenden?

1. Die anatomische Form und das geringe Gewicht ermöglichen, dass sich die zwei Silberhütchen weich und kaum spürbar an die Haut anschmiegen.
2. Sie schützen die Brustwarzen vor dem Austrocknen, dem Scheuern, sowie dem Verkleben mit der Kleidung und beugen einem Abknicken vor.
3. Die feuchte Wundheilung in Muttermilch begünstigt den Heilungsprozess.



*Klinisch dermatologische Anwendungsstudie mit 4-wöchiger Anwendung

Stillen ohne Brustwarzensalben



Warum ist es so wichtig auf Salben zu verzichten?

Die Drüsen in den Brustwarzen produzieren ein spezielles Sekret, welches den Suchreflex des Babys anregt. Der Duft des Sekrets ähnelt dem Geruch des Fruchtwassers und hilft dem Baby dabei zu der Brustwarze und der richtigen Saugposition zu finden. Salben oder ähnliche Produkte können diesen Duft beeinträchtigen. Trotz gründlicher Reinigung können Salbenrückstände auf der Haut zurückbleiben, die von dem Baby während des Stillens mit verzehrt werden.

Mit den Livella Silberhütchen ist ein Stillen ohne aufwendige Reinigung der Brustwarzen jederzeit möglich und der charakteristische Duft der Brust bleibt erhalten.

Erfahre jetzt mehr auf www.livella.de

